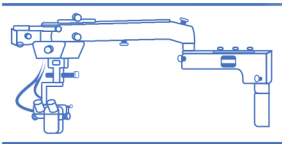
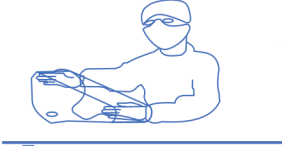
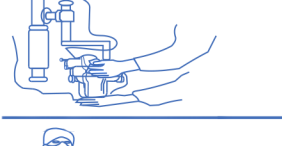
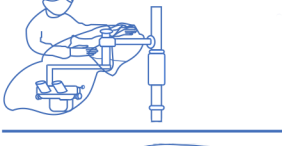
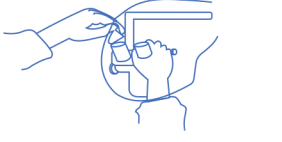


Чехол одноразовый, стерильный

Стерильді, бір рет қолданылатын қорғаныш қап

	Инструкция 1. Подготовьте микроскоп, надежно закрепив кабели. Подгоните исходное положение тубуса (окулярлов и рукояток) микроскопа в удобное для вас положение во время операции.	Нұсқаулық 1. Кабельді сенімді бекітіп, микроскопты дайындаңыз. Микроскоп тубусының бастапқы жағдайын операция кезінде сіз үшін ыңғайлы жағдайға бұрыңыз (окулярлар және тұтқалар).
	2. Выньте чехол из стерильной упаковки. Разверните чехол. Защитная линза для объектива микроскопа должна смотреть лицом вниз, этикетка с указательной стрелкой должна быть направлена вверх, от Вас.	2. Қаптаманы стерилді орамнан алыңыз. Қаптаманы ашыңыз. Микроскоп объективі үшін қорғаныш линзасы төменге қарауы тиіс, нұсқау сызығы бар этикетка бетімен жоғары қарап, сізден бағытты көрсетуі тиіс.
	3. Найдите посередине слой, на котором по краям расположены наклейки с изображением рук. Поместите руки над этим слоем внутри чехла по центру и раздвиньте их до места положения наклеек, натянув при этом пакет и образовав некую полость.	3. Қолдың суреті бар қаптамалар шетінде орналасқан қабаттың ортасын табыңыз. Осы қабаттың үстіне ортасынан қолды орналастырыңыз және оларды әлдебір қуысты түзіп және пакетті тартып, жапсырма жағдайының орнына дейін оларды жылжытыңыз.
	4. Наденьте чехол предварительно на такие выступающие части тубуса микроскопа, как окуляры и рукоятки и продолжайте его разворачивать до верхней части тубуса.	4. Окулярлар және тұтқалар сияқты микроскоп тубусының шығатын бөлігіне алдын ала қаптама кигізіңіз және оны тубустың үстіңгі бөлігіне дейін ашуды
	5. Зафиксируйте защитную линзу на объективе со световой лампой простым надавливанием с помощью руки.	5. Қолдың көмегімен жай ғана басумен жарық шамымен қорғаныш линзасын бекітіңіз.
	6. Разверните оставшуюся часть чехла над штативом микроскопа. Свисающие широкие части соберите вверх и зафиксируйте их в сложенном положении, обмотав специальными стропами (лентами).	6. Микроскоп штативінің үстіне қаптаманың қалған бөлігін ашыңыз. Төмен түсетін қалған бөлігін оларды тиісті түрде жинап, жоғары жинаңыз. Осыдан кейін оларды арнайы матауышпен (таспамен) байлап жиналған жағдайда бекітіңіз.
	7. Затяните излишки концов рукава для окуляров, обмотав их специальной лентой. Непосредственно перед работой, оторвите кончики с перфорацией.	7. Оларды арнайы таспамен байлап, тиісті түрде окулярлар үшін жеңнің ұшының артықтарын тартыңыз. Тікелей жұмыс алдында перфорациясы бар ұштарын ағытыңыз.